

Tube Extensor Safeed

Instruções de Uso

Estérel e apirogênico se a embalagem unitária não estiver aberta ou deteriorada.
Ao abrir a embalagem unitária, usar imediatamente.
Não utilizar se a embalagem unitária ou o produto estiver sujo e/ou danificado.

Indicação de Uso

Este tubo extensor é para ser utilizado somente com as bombas de infusão TERUFUSION TE*171 / TE*172, quando for conectado à linha de infusão após o Equipo de Transfusão.

Não utilizar este tubo extensor com outras bombas de Infusão. Seguir as instruções do Manual de Operação da Bomba.

Instruções de Uso:

Remover o tubo extensor da embalagem unitária de maneira asséptica. Adaptar aos dispositivos a serem utilizados no procedimento. Colocar o tubo extensor no setor de dedilhamento peristáltico da bomba. Se o tubo for utilizado por longo período, a taxa de fluxo real pode desviar-se do valor fixado devido à deformação do tubo. Trocar a posição do tubo cerca de 10 cm para frente ou para trás a cada 24 horas ou substituir o tubo a cada 24 horas.

Produto de Uso Único. Proibido Reprocessar.

Modelos Disponíveis

Tubo Extensor Safeed- 165 cm, vol. Interno 12,9 mL, conector Luer Lock

Armazenagem

Não armazenar em condições de temperaturas extremas (acima de 40°C) nem em locais úmidos. Evitar a luz solar direta.

Tempo de Validade: 18 meses

Esterilização: ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO

Fabricado por:

Terumo Corporation
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku
Tóquio - Japão

Importado e Distribuído por:

TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA.
Praça General Gentil Falcão, 108 conj. 91 e 92- Brooklin Novo- São Paulo-SP
C.N.P.J. 03.129.105/0001-33

Registro ANVISA: 80012280110
Resp. Téc. Daniela Félix de Almeida – CRBM-SP nº 10.146

Informações ao Consumidor: Fone: (0XX11) 35943800 E-mail: sac@terumo.com.br

IU0110A-Rev01