

# TERUMO DENTAL NEEDLE

## Instruções de Uso

### INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O produto é usado com uma seringa cartucho com a finalidade de aplicação de anestesia em procedimentos odontológicos.

### ADVERTÊNCIAS

- Para seringa do tipo cartucho.
- Estéril e apirogênico em embalagem unitária intacta.
- Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar.

### PRECAUÇÕES


- Não dobre a agulha antes de ser usada, uma vez que isto pode causar ruptura e possível dano ao paciente.
- Não utilizar se a embalagem unitária estiver violada ou danificada.
- Usar imediatamente após a abertura da embalagem da embalagem individual.
- Elimine com segurança após uma única utilização para evitar o risco de infecção. Não armazenar em condições extremas de temperatura e umidade.
- Evitar exposição direta à luz solar.
- O produto é esterilizado por gás Óxido de Etileno.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Instruções de utilização

1. Torça a tampa e retire-a puxando em linha reta para fora, sem tocar a cânula.
2. Encaixe a base da agulha na seringa designada, enquanto a cânula permanece coberta pela capa. Nota: Este produto é próprio para seringas carpule (tipo rosca).
3. Remova a capa da cânula puxando-a para fora e realize a injeção.

Nota: Antes de injetar, retire o ar da cânula liberando algumas gotas.

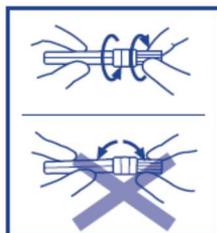

Cuidado: A cânula pode estar obstruída com pedaços de borracha cortados do tubete. Isto pode resultar no bloqueio da cânula.

4. Após retirar a agulha, estanque o sangramento, se necessário.

**Condições de armazenamento, transporte e manipulação:** Não armazenar, transportar ou manipular em condições extremas de temperatura e umidade. Evitar exposição direta à luz solar.

**Validade:** 5 anos.

### Conteúdo da embalagem:

A Agulha Gengival Terumo é embalada individualmente e então embaladas em caixas com 100 unidades. Estas caixas com 100 unidades são embaladas em caixas de embarque com 2.000 unidades por caixa.

As Agulhas Gengivais Terumo estão disponíveis nos seguintes modelos: DN\*2735Q; DN\*3021Q.

Calibre da Agulha (G): 27 e 30

Comprimentos (mm): 21 e 35

Modelo	D. EXT. (G)x COMP. (POL)	D. EXT. (MM)x COMP. (MM)	Tipo de Esterilização
DN*2735	27G x 1 3/8"	(0,40 x 35mm)	Esterilizado por óxido de etileno
DN*3021	30G x 13/16"	(0,30 x 21mm)	Esterilizado por óxido de etileno

### Simbologia



Referência



Número de lote



Produto de uso único



Esterilizado com óxido de etileno



Fabricante



Validade



Frágil,  
manusear  
com cuidado



Manter  
seco



Manter ao  
abrigo do sol

**ESTÉRIL**  
**PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR**  
**ESTERILIZADO POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO**

**Nome Técnico:** Agulhas Gengivais Descartáveis.

**Fabricado por:**

**TERUMO CORPORATION**  
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tóquio 151-0072  
Japão

**Importado e Distribuído por:**

**TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA.**  
Praça General Gentil Falcão, 108 conj. 91 e 92 - Brooklin Novo - São Paulo - SP  
C.N.P.J. 03.129.105/0001-33

Registro ANVISA: 80012289016  
Resp. Téc. Daniela Félix de Almeida – CRBM-SP nº 10.146

**Informações ao Consumidor:** Fone: (0XX11) 3594-3800 E-mail: [tmsac@terumomedical.com](mailto:tmsac@terumomedical.com)

IU9016-Rev00